

供血用遠心分離器

メディフュージ MEDIFUGE

添加物を一切用いない、完全自己血液由来のフィブリンゲル



MEDIFUGE

供血用遠心分離機

メディフュージ 製品番号/C00020

▶ 13分間で自動的にフィブリンゲルが作製されます。



医療機器届出番号：13B2X00317C00004

point1 簡単


セットしてスタートボタンを押すだけ

point2 迅速

遠心操作は一回のみで、遠心時間13分

「メディフュージ」で遠心分離を行うことにより、血液中の血小板や赤血球が分離されます。それと同時に、血液中の凝固因子が自然に刺激されてフィブリンゲルが形成されます。このフィブリンゲルは、成長因子や血小板などを多く含むうえ、添加物を一切用いないため、完全自己血液由来のゲル素材といえます。

操作方法

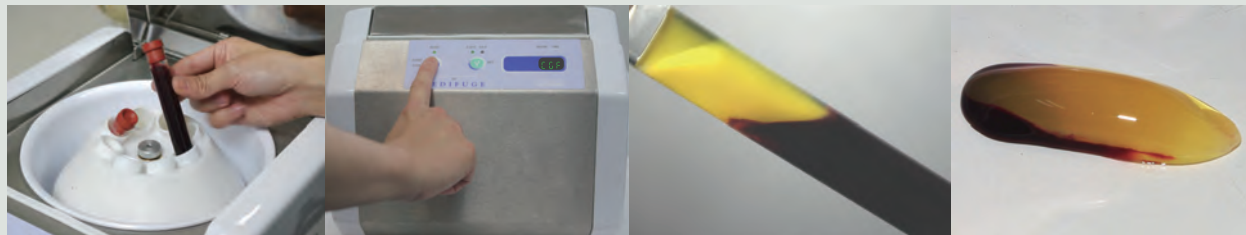

① 採血後、すぐにセット

② スタートボタンを押し、遠心開始

③ 遠心分離後の様子

④ 採取したフィブリンゲル

※ なるべく早く遠心にかけてください。すぐに凝固が始まるので、時間がたつとフィブリンゲルの作製効率下がることがあります。

※ フィブリンゲルの大きさや色などには個人差があります。

CHECK!

- ◆ 最大8本まで血液サンプルのセットが可能
- ◆ UV サイクルを搭載
UV ランプ(殺菌灯)により、装置内側を殺菌することができます。
- ◆ オートクレーブ耐性
内部のホルダーは、オートクレーブ滅菌することが可能です。



電源電圧	AC 100 V (50/60 Hz)
定格電力	120 VA
本体重量	9.4 kg
本体サイズ	W 280 × D 320 × H 240 mm

●製造販売元 コアフロント株式会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11
TEL.03-5579-8710

●製造元 SILFRADENT S.R.L. (ITALY)
シルフラデント エスアールエル



●販売元 ジンマー・バイオメット・デンタル合同会社



ZIMMER BIOMET
ジンマー・バイオメット・デンタル

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F ●製造販売業許可番号 13B1X00079
TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084